


Schröpfgläser aus Glas

Basis UDI-DI: 4251054442885T2

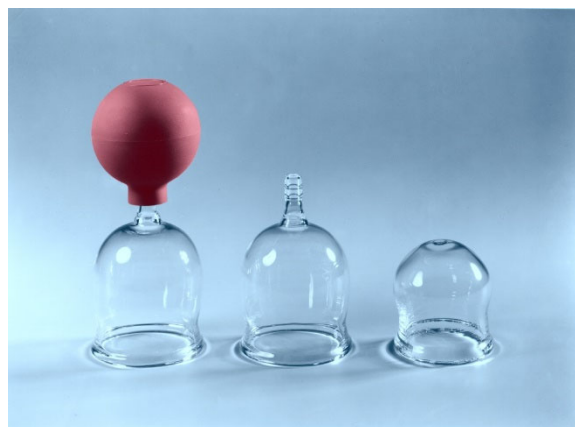

Gebrauchsanweisung



Made in Germany



Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG
Assistent
Stettener Str. 22-24
D-97647 Sondheim/Rhön
Germany



Schröpfgläser werden handgefertigt aus hochwertigem, stabilem Glas an unserem Standort in Sondheim/Rhön. Glas ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, ohne negative Einflüsse auf die Umwelt.

Die Gläser werden in verschiedenen Größen und Ausführungen (mit Olive und Ball, ohne Olive) und für die verschiedenen Arten des Schröpfens (Schröpfmassage, trockenes und blutiges Schröpfen) gefertigt

Übersicht der Schröpfgläser

| Produkt (Handelsname) | Artikelnr. | Größe ca. Ø cm | Ersatzball |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sauggläser nach Bier | 42885003 | 3 | 91076622010 |
| mit Ball aus PVC | 42885004 | 4 | 91076622010 |
| | 42885005 | 5 | 91076622010 |
| | 42885006 | 6 | 91076622010 |
| | Ohne Ball | 42886003 | 3 |
| | 42886004 | 4 | 91076622010 |
| | 42886005 | 5 | 91076622010 |
| | 42886006 | 6 | 91076622010 |
| | | | Größe ca. Ø x Höhe cm |
| Massage-Schröpfgläser | 42887010 | 5 x 11 | --- |
| Ohne Olive | 42887020 | 3 x 9 | --- |
| Mit Olive ohne Ball | 42888010 | 5 x 11 | 91288922010 |
| | 42888020 | 3 x 9 | 91289322010 |
| mit Olive und Ball aus PVC | 42889001 | 3 x 9 | 91289322010 |
| | 42889010 | 5 x 11 | 91288922010 |
| | | Größe ca. Ø cm | |
| Schröpfköpfe, mundgeblasen | 42891001 | 2,5 | --- |
| Ohne Olive | 42891002 | 3,5 | --- |
| | 42891003 | 4,4 | --- |
| | 42891004 | 5,0 | --- |
| | 42891005 | 6,5 | --- |
| | Mit Olive ohne Ball | 42892001 | 2,5 |
| 42892002 | | 3,5 | 91076622010 |
| 42892003 | | 4,4 | 91289322010 |
| 42892004 | | 5,0 | 91289322010 |
| 42892005 | | 6,5 | 91289322010 |
| mit Olive und Ball aus PVC | 42893001 | 2,5 | 91076622010 |
| | 42893002 | 3,5 | 91076622010 |
| | 42893003 | 4,4 | 91289322010 |
| | 42893004 | 5,0 | 91289322010 |
| | 42893005 | 6,5 | 91289322010 |

Tabelle1

Anwendung:

Schröpfköpfe werden zum Schröpfen verwendet. Sie können zum blutigen oder trockenen Schröpfen und zur Schröpfkopfmassage verwendet werden.

Zur Behandlung wird ein Unterdruck im Glas benötigt. Der Unterdruck wird bei Gläsern mit Olive durch einen Saugball erzeugt, dazu den mitgelieferten Saugball fest auf der Glasolive montieren. Bei Verlust oder Defekt können Schröpfglas oder Saugball einzeln nachbestellt werden. Die Bestellnummern finden Sie in Tabelle 1.

Bei Gläsern ohne Olive wird der Unterdruck durch Erhitzen des Innenraums (Feuerschröpfen) erzeugt.

Indikationen:

Das Schröpfen soll das Wohlbefinden des Patienten verbessern, Verspannungen lösen und Schmerzen lindern. Schröpfen wird zur Therapie verschiedener gesundheitlicher Probleme eingesetzt. Es ist zur Behandlung am Rücken, Armen, Beinen und bei Gelenksproblemen geeignet, weitere Anwendungsgebiete:

- Chronische Schmerzen
- Bluthochdruck
- Menstruationsstörungen
- nicht alkoholische Fettlebererkrankung

Heilpraktiker und Ärzte wenden das Schröpfen im Rahmen einer naturheilkundlichen Behandlung an. (Die Anwendung darf nur durch geschulte Therapeuten erfolgen.)

Für unsachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Kontraindikationen:

Schröpfen darf nicht angewendet werden bei

- Entzündeten und verletzten Hautarealen
- Allergischen Hautveränderungen
- Blutgerinnungsstörungen
- Einnahme von Medikamenten zur Blutverdünnung

Mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang einer Behandlung mit Schröpfköpfen:

Wie viele medizinische Behandlungen kann auch das Schröpfen gelegentlich Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Narbenbildung
- Verbrennungen
- Lokale Infektion, Abszesse
- Systemische Infektion
- Kreislaufprobleme (kurzzeitige Bewusstlosigkeit)
- Starke Blutungen
- Schmerz nach Behandlung
- Bildung von entzündlichen Bläschen

Reinigung:

Die Schröpfköpfe sind bei Lieferung vorgereinigt aber nicht desinfiziert/sterilisiert.

Vor der jeder Anwendung müssen die Schröpfköpfe desinfiziert (unblutiges Schröpfen) bzw. sterilisiert (blutiges Schröpfen) werden.

Wiederaufbereitungsanleitungen für beiden Verfahren können bei Bedarf angefordert oder von unserer Internetseite <https://www.assistent.eu/service/> heruntergeladen werden.

Funktionskontrolle:

Sichtkontrolle vor der Anwendung auf Defekt oder Verschleiß (z. B. Glasbruch). Defekte Instrumente dürfen nicht zur Anwendung kommen.

Handhabung / Lagerung:



Schröpfköpfe müssen wegen Bruchgefahr sorgfältig gelagert und behandelt werden. Sie müssen z. B. vor Stößen und Herunterfallen geschützt werden

Lebensdauer / Entsorgung:

Schröpfköpfe können für eine unbestimmte Anzahl von Anwendungen verwendet werden. Wird bei Funktionskontrolle ein Defekt festgestellt, dürfen die Gläser wegen Verletzungsgefahr nicht mehr zur Behandlung verwendet werden.

Vorsicht bei der Entsorgung von defekten Gläsern wegen Verletzungsgefahr (z. B. scharfe Kanten), kontaminiertes Material nach bestehenden Vorschriften entsorgen.

Schwerwiegende Vorfälle:

Bei schwerwiegenden Vorfällen wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Kontaktdaten (smp@assistent.eu) oder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM (www.bfarm.de) oder die in Ihrem Land für Medizinprodukte zuständige Behörde.

Kontakt:

Glaswarenfabrik
Karl Hecht GmbH & Co KG
Stettener Str. 22-24

D-97647 Sondheim/Rhön
Germany
Tel.: +49 9779 8080
E-Mail: smp@assistent.eu
Internet: www.assistent.eu